

BIOSYNEX

Tire-tique

Tick remover / Tekenhaak / Zeckenzangen / Pinzetta per zecche

RÉUTILISABLE

REUSABLE / HERBRUIKBAAR /
WIEDERVERWENDBAR / RIUTILIZZABILE

INDOLORE

PAINLESS / PIJNLOOS /
SCHMERZFREI / INDOLORE



KIT_858775_FR_V03202009R01



BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Briant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

BIOSYNEX

Tire-tique

EN TICK REMOVER


INSTRUCTIONS FOR USE

- 1/ Select the hook corresponding to the size of the tick
- 2/ Slide the head of the hook between the parasite and the skin
- 3/ Rotating the hook will enable you to remove the tick

DE ZECKENZANGEN

GEBRAUCHSANWEISUNG


- 1/ Wählen Sie die Zange entsprechend der Zeckengröße.
- 2/ Schieben Sie den Zangenkopf möglichst nah an der Haut unter die Zecke.
- 3/ Lösen Sie die Zecke durch vorsichtiges Drehen der Zange und ziehen Sie sie aus der Haut.

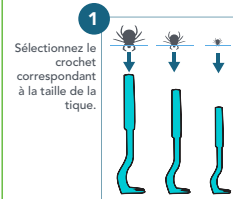

1
Sélectionnez le
crochet
correspondant
à la taille de la
tique.



2
Glissez la tête
du crochet
entre le
parasite et la
peau.

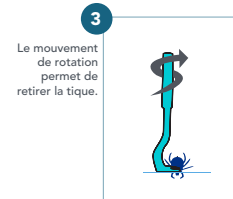

3
Le mouvement
de rotation
permet de
retirer la tique.

NL TEKENHAAK

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1/ Kies de juiste maat haak aan de hand van de grootte van de teek.
- 2/ Schuif de kop van de haak tussen de teek en de huid.
- 3/ Door de haak te draaien, komt de teek los van de huid.

IT PINZETTA PER ZECCH

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1/ Selezionare il gancio che corrisponde alle dimensioni della zecca
- 2/ Far scivolare la testa del gancio tra il parassita e la pelle
- 3/ Il movimento di rotazione del gancio permette di rimuovere la zecca