



1- Produit

1.1- Description

Poignée pour CareBag Urinal Masculin destinée à faciliter l'utilisation du dispositif de recueil des excréta CareBag Urinal Masculin. Brevetée, elle est conçue pour être utilisée et accrochée dans les 2 sens selon la préférence du patient. Utilisation à Patient unique, recyclable.

1.2- Composition

Polypropylène grade pharmaceutique.

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

1. Choisir le sens d'utilisation qui conviendra le mieux au patient.
2. Placer CareBag Urinal Masculin dans l'encolure de CareBag URlgrip.
3. Serrer un lien de chaque couleur du sac.
4. Positionner les liens dans les fentes comme indiqué afin de sécuriser la mise en place de CareBag Urinal Masculin.
5. Mettre à disposition du patient.
6. Le patient peut fermer le sac en l'entortillant en plaçant la partie étroite au niveau de la fente latérale.
7. Le patient peut accrocher CareBag URlgrip au niveau de son lit.
8. Enlever le sac en desserrant les liens. Fermer le sac en faisant un nœud.
9. Après élimination du sac usagé, nous recommandons de placer un sac neuf afin d'anticiper tout besoin urgent.

2.2- Élimination

Durée maximale d'utilisation conseillée : 3 semaines

La poignée doit être jetée en fin de séjour du patient selon le protocole en vigueur. CareBag URlgrip peut être recyclée dans la filière de recyclage du plastique (type bouteille d'eau).

2.3- Précautions d'emploi

Utilisation à Patient unique. Utiliser votre protocole de nettoyage et de désinfection habituel après utilisation. Ce produit n'a pas été conçu pour un nettoyage au lave-bassin.

3- Réglementaire

3.1- Conformité

Marquage CE - Conforme à la Règlementation Européenne relative aux dispositifs médicaux en vigueur. Accessoire de Dispositif Médical de classe I

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot et comporte une date de fabrication.

3.3- Code douanier

3924 90 00 90 (selon la législation européenne en vigueur)

3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

4- Colisage

RÉF. CATALOGUE	UNITÉ DE VENTE	CAISSE AMERICAINE	PALETTE
6020022	-	Carton contenant une sachette de 25 poignées 600x400x200mm	8 étages de 4 cartons 32 cartons = 800 poignées 120x80x195cm
6020020	Sachette contenant 1 poignée 227x340mm	25 poignées emballées individuellement 600x400x300mm	6 étages de 4 cartons 24 cartons = 600 poignées 120x80x195cm

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); caisse américaine: dimensions extérieures
- Dimensions, poids, volume : ± 5%
- Version 29052020