



1- Produit

1.1- Description

Protège WC à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%, équivalence fluides biologiques), destiné au recueil des excréta.

1.2- Composition

Sac : PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus. Dimensions utiles: 65x38 cm, 37µm.
Tampon super-absorbant : Support à base de cellulose et de polyacrylate de sodium. Dimensions: 24x13 cm.

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protège-WCs.
2. Dérouler le 1^{er} protège WC et tirer en séparant le long des marques de perforation.
3. Ouvrir le sac, le positionner au dessus de la cuvette des WC sur ou sous l'assise des WC (la lunette), qui le maintient.
4. Le tampon doit être au fond du protège WC.
5. Utiliser les WC.
6. Attendre que le contenu soit transformé en gel.
7. Fermer le sac avec un nœud.

2.2- Élimination

Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas laisser à portée des enfants.

3- Réglementaire

3.1- Conformité

Marquage CE - Conforme à la Règlementation Européenne relative aux dispositifs médicaux en vigueur.

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

3.3- Code douanier

3923210000

3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Colisage

REF. CATALOGUE	UNITÉ DE VENTE	CAISSE AMERICAINE	PALETTE
9538534	Contenu de l'étui: Pack de 20 sacs 200x115x115mm 0,8kg	18 packs de 20 sacs (soit 360 sacs) 415x365x365mm 15kg	30 cartons - Soit 540 packs (soit 10800 sacs) 120x80x200cm 460 Kg (palette comprise) 5 étages de 6 cartons

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente/caisse américaine: dimensions extérieures
- Dimensions, poids, volume : ± 5%

- Référence du document: INNO-DO-013
- Version : 02