



1- Produit

1.1- Description

Tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 450 ml de solution saline 0,9%, équivalent fluides biologiques).

1.2- Destination

Gélification des fluides corporels dans un bac de collecte, un container à déchets ou dans divers contenants de type bassine. Il peut aussi être utilisé pour augmenter la capacité d'absorption des sacs CareBag® si nécessaire.

1.2- Composition

Support non-tissé à base de fluff (Cellulose) et de Polymères Super-Absorbants (SAP)
Dimensions: 24x13cm

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

1. Ouvrir le pack et en extraire un tampon super-absorbant.
2. Placer le tampon super-absorbant sur la zone souhaitée.
3. Attendre la gélification des liquides.
4. Jeter à l'endroit approprié.

En cas d'utilisation avec les produits CAREBAG, il est recommandé d'ajouter des tampons en fonction du volume de fluides à recueillir:

CareBag	Protège Bassin/Seau/ WC Bedpan/Commode/WC liner	Urinal masculin Male Urinal	Sac vomitoire Vomit bag
Vol. Max Abs.	3 L	1,5 L	1,75 L
Nb. GelMax Tampon Nb. Packs maximum	6-7	3	4

2.2- Élimination

Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Liquide avec biocides: dans la filière appropriée selon réglementation en vigueur. Ne pas jeter la dose dans les canalisations et les égouts.

2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi.
Ne pas utiliser ce produit pour gélifier les produits chimiques suivants : acides forts (concentrations>3%), bases fortes (concentrations>10%) et agents oxydants forts.
Rincer abondamment l'œil en cas de contact oculaire ou la bouche en cas d'ingestion ; appeler un médecin si nécessaire. Ne pas laisser à la portée des enfants.

3- Réglementaire

3.1- Conformité

Marquage CE - Conforme à la Réglementation Européenne relative aux dispositifs médicaux en vigueur.

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

3.3- Code douanier

9619008900 (selon la législation européenne en vigueur).

3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.
A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Colisage

RÉF. CATALOGUE	UNITÉ DE VENTE	CAISSE AMERICAINE	PALETTE
9582104	Contenu de l'étui : Pack de 25 tampons 250x50x150mm 0,47kg	21 packs de 25 tampons (soit 525 tampons) 756x360x153mm 11,6Kg	33 cartons soit 693 packs 120x80x196cm 397kg (palette comprise) 11 étages de 3 cartons

• Marques, dessins et modèles internationaux déposés

• Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente: dimensions extérieures; caisse américaine : dimensions intérieures

• Dimensions, poids, volume : ± 5%

☐ Référence du document: INNO-DO-006

☐ Version : 03