

FICHE TECHNIQUE

Pack x200 – Réf. Catalogue: 9829177

1- Produit

1.1- Description

Lot de dispositifs de recueil des excréta, à liens coulissants et munis de tampons super-absorbants (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%, équivalent fluides biologiques).

1.2- Composition

Sacs: PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus. Dimensions utiles: 59x38 cm, 37µm.

Tampon super-absorbant: Support à base de cellulose et de polyacrylate de sodium. Dimensions: 24x13 cm.

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

- 1- Utiliser le sac selon l'application désirée.
- 2- S'assurer de la présence du tampon absorbant à l'intérieur avant utilisation.
- 3- Attendre que le contenu soit transformé en gel.
- 4- Fermer le sac avec un nœud.

2.2- Élimination

Les sacs et les tampons devront être éliminés convenablement : de préférence dans les déchets ménagers (et conformément à la réglementation applicable).

2.3- Précautions d'emploi

Sacs et tampons sont à usage unique. Tenir hors portée des enfants. En cas de contact oculaire avec le tampon super-absorbant rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas utiliser sur peau lésée.

3- Réglementaire

3.1- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

3.2- Code douanier

3923210000

3.3- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Colisage

RÉF. CATALOGUE	UNITE DE VENTE	PALETTE
9829177	Contenu de la caisse américaine: 200 dispositifs (200 sacs + 200 tampons absorbants) 260x255x315 mm 7 Kg	60 cartons - 12 000 sacs + 12 000 tampons 120x80x175 cm 454 kg (palette comprise) 5 étages de 12 cartons

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente: dimensions extérieures
- Dimensions, poids, volume : ± 5%

- Référence du document: INNO-DO-033
- Version : 02