



1- Produit

1.1- Description

Système pliable, portable, et hygiénique de toilettes sèches composé de :

- Une assise + 12 sacs hygiéniques absorbants.
 - **Assise** : un caisson WC en carton rigidifié, bords non tranchants, pliable, montable et démontable, réutilisable de nombreuses fois, résistance 115 kg.
 - **Sacs avec tampon superabsorbant**: les sacs viennent couvrir et protéger l'assise du caisson et intègrent un tampon super-absorbant anti-odeurs qui transforme en gel les fluides biologiques (capacité d'absorption de 450ml saline 0,9%, équivalent fluides biologiques).
 - Sac : PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus. Dimensions utiles : 59x38 cm, 37 µm.
 - Tampon super-absorbant: Support à base de cellulose et de polyacrylate de sodium. Dimensions: 24x13 cm

Des recharges de 12 sacs absorbants sont disponibles séparément.

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

Utiliser selon la notice

- 1- Ouvrir la boîte, sortir et monter l'assise carton.
 - 2- Ouvrir le sac protège WC. Positionner le sac sur l'assise WC et le fixer. Le tampon absorbant doit être placé au fond du sac protège WC.
 - 3- Utiliser les toilettes.
 - 4- Après usage, le contenu est gélifié ; fermer le sac et jeter à l'endroit approprié, selon les instructions du §2.2.
- Assise carton réutilisable de nombreuses fois.

2.2- Élimination

Les sacs, les tampons et l'assise carton devront être éliminés convenablement : de préférence dans les déchets ménagers (et conformément à la réglementation applicable).

2.3- Précautions d'emploi

Sacs et tampons sont à usage unique. Tenir hors portée des enfants. En cas de contact oculaire avec le tampon super-absorbant rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas utiliser sur peau lésée.

3- Réglementaire

3.1- Conformité

Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

3.3- Code douanier

3923210000

3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Colisage

RÉF. CATALOGUE	UNITÉ DE VENTE	PALETTE
9829183	Contenu de l'étui: 1 assise toilette pliable + 12 sacs absorbants 560x500x60 mm 2 kg	30 unités (30 assises toilette pliable + 360 sacs absorbants) 120x80x115 cm 66 kg 15 étages de 2 cartons

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente: dimensions extérieures
- Dimensions, poids, volume : ± 5%

- ☐ Référence du document: INNO-DO-025
- ☐ Version : 04