



FICHE TECHNIQUE

Pack x12, Réf. Catalogue: 9929186

1- Produit

1.1- Description

Gants de toilette à usage unique doublés d'un revêtement interne, pré-imbibés d'une lotion nettoyante (formule sans parfum spéciale peaux fragiles) pour la toilette corporelle quotidienne sans rinçage, particulièrement des patients âgés, alités ou affaiblis. Les gants Aqua SENSITIVE peuvent être aussi utilisés chez les nouveau-nés.

1.2- Composition

Gant : non-tissé : 90 g/ m², gaufré 3D, 40% viscose, 60% PET, doublé d'un film PE 20µm.

Lotion : Ingrédients: AQUA, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, DIMETHICONE, DECYL GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, SORBITAN CAPRYLATE, CAPRYL/CAPRYL GLUCOSIDE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM EDTA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE (AND) HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, BISABOLOL.

1.3- Caractéristiques

Les gants de toilette Aqua SENSITIVE sont imbibés d'une lotion nettoyante et hydratante, formulée avec des actifs protecteurs et hydratants.

La lotion ne contient ni alcool ni savon et a été testée dermatologiquement (3 tests) :

Patch test (irritation cutanée), test ophtalmologique (irritation oculaire), test d'hypollargénicité.

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

1- Ouvrir le pack.

2- Chauffer le pack au micro-ondes, si besoin, pour plus de confort, selon les indications:

| Gloves (units) | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12-10 | 9-8 | 7 | 6 | 5-4 | 3 | 2 | 1 |
| 80s | 60s | 50s | 40s | 30s | 20s | 15s | 10s |

3- Prendre un gant de toilette et y enfiler la main, refermer le pack.

4- Laver directement la peau selon le protocole de toilette en vigueur, le produit n'a pas besoin d'être rincé.

5- La lotion sèche sur la peau et forme une couche de protection; le produit peut ne pas être séché.

2.2- Élimination

Ne pas jeter aux toilettes. Élimination selon les protocoles en vigueur : dans les déchets ménagers ou en DASRI si indiqué.

2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas utiliser sur peau lésée. En cas de risque infectieux, réserver chaque pack de gants à un patient unique. Rincer abondamment l'œil en cas de contact oculaire ou la bouche en cas d'ingestion ; appeler un médecin si nécessaire. À conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

3- Réglementaire

3.1- Conformité

Conforme au Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot, une date de péremption et une période après ouverture (6 mois).

3.3- Code douanier

3401110000 (selon la législation européenne en vigueur).

3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Colisage

| RÉF. CATALOGUE | UNITÉ DE VENTE | CAISSE AMERICAINE | PALETTE |
|----------------|---|---|---|
| 9929186 | 1 pack = 12 pièces 250x110x43 mm 0,38kg | 1 master carton = 12 packs 264x238x235 mm 4,7kg | 1 palette = 60 master cartons 4 étages de 15 120x80x110 cm - 282kg (palette comprise) |

• Marques, dessins et modèles internationaux déposés

• Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente: dimensions extérieures; caisse américaine : dimensions extérieures

• Dimensions, poids, volume : ± 5%

Référence du document: INNO-DO-008

Version : 02