



FICHE TECHNIQUE

Pack x12, Réf. Catalogue : 9929200

1- Produit

1.1- Description

Gants de toilette à usage unique doublés d'un revêtement interne, pré-imbibés d'une lotion pour le shampoing quotidien sans rinçage, particulièrement des patients âgés, alités ou affaiblis.

1.2- Composition

Gant : non-tissé : 90 g/m², gaufré 3D, 40% viscose, 60% PET, doublé d'un film PE 20µm.

Lotion : Ingrédients : AQUA, GLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, DIMETHICONE, DECYL GLUCOSIDE, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, SORBITAN CAPRYLATE, CAPRYL/CAPRYL GLUCOSIDE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM EDTA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE (AND) HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, PANTHENOL, TOCOPHERYL ACETATE, BISABOLOL, PARFUM, CITRONELLOL, LINALOOL.

1.3- Caractéristiques

Les gants de toilette Aqua SHAMPOO sont imbibés d'une lotion nettoyante et hydratante, formulée avec des actifs protecteurs et hydratants.

La lotion ne contient ni alcool ni savon et a été testée dermatologiquement (2 tests) : Patch test (irritation cutanée), test ophtalmologique (irritation oculaire).

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

- Ouvrir le pack.
- Chauffer le pack au micro-ondes (700W), si besoin, pour plus de confort, selon les indications:

Gloves (units)							
12-10	9-8	7	6	5-4	3	2	1
80s	60s	50s	40s	30s	20s	15s	10s

- Prendre un gant shampoing (ou deux en cas de cheveux longs) et y enfiler la main, refermer le pack.
- Laver directement les cheveux, possibilité de masser le cuir chevelu; le produit n'a pas besoin d'être rincé.
- Sécher délicatement en tamponnant, peigner ou brosser comme d'habitude.

2.2- Élimination

Ne pas jeter aux toilettes. Élimination selon les protocoles en vigueur: dans les déchets ménagers ou en DASRI si indiqué.

2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas utiliser sur peau lésée. Rincer abondamment l'œil en cas de contact oculaire ou la bouche en cas d'ingestion ; appeler un médecin si nécessaire. À conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

3- Réglementaire

3.1- Conformité

Conforme au Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

3.2- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot, une date de péremption et une période après ouverture (6 mois).

3.3- Code douanier

3305100000 (selon la législation européenne en vigueur).

3.4- Sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Colisage

RÉF. CATALOGUE	UNITÉ DE VENTE	CAISSE AMERICAINE	PALETTE
9929200	1 pack = 12 pièces 250x110x43 mm 0,38kg	1 master carton = 12 packs 264x238x235 mm 4,7kg	1 palette = 60 master cartons (4 étages de 15) 120x80x110 cm - 282kg (palette comprise)

- Marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions: format L (longueur) x l (largeur) x H (hauteur); unité de vente: dimensions extérieures; caisse américaine : dimensions extérieures
- Dimensions, poids, volume : ± 5%

- Référence du document: INNO-DO-010
- Version : 02