



reference : W.PROTEGESEAU

Protège seau de chaise à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant.

Capacité d'absorption de 500 ml de solution saline 0,9%, équivalente aux fluides biologiques.

Composition : Sac: PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus. Dimensions : 52x40 cm, Tampon super-absorbant : Support non-tissé à base de fluff (Cellulose) et de Polymères Super-Absorbants (SAP), 24x13cm pour une capacité d'absorption de 500 ml de solution saline 0,9%.

UTILISATION : MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protèges-seaux
2. Dérouler le 1er protège-seau et tirer en séparant le long des marques de perforation
3. Ouvrir le sac, le positionner sur le seau, rabattre l'assis de la chaise
4. Le tampon doit être au fond du protège-seau
5. Utiliser le seau garni du protège-seau
6. Attendre que le contenu soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ
7. Fermer hermétiquement le sac.

Elimination : Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

Précautions d'emploi : Produit à usage unique. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants.

INFORMATIONS

Code EAN Boite : 3760360510782
Boite dimension : 19x11x11 cm
Poids : 0.915kg

Code EAN Carton : 3760360510799
Carton dimension : 39x35x35c m
Poids : 16.5 kg

RÉGLEMENTATION

Conformité :

Conforme aux dispositifs médicaux – Classe I. - CE

Identification :

Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans).

Sécurité :

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.



www.subra-medical.fr



ZI Thibaud
7 rue Jean de Guerlins
31100 Toulouse



Tél. : 05 34 637 637
Fax : 05 34 637 600



Mail : contact@subra-medical.fr